

LOCaLizer™ Aplicador de Marcador Rx ONLY Aplicador de Marcador S

Instruções de Utilização

DESCRIÇÃO

Sistema de Localização RFID

O Aplicador de Marcador, o Leitor LOCaLizer™, e a Sonda Cirúrgica LOCaLizer são componentes do Sistema de Localização RFID.

O Marcador destina-se a ser colocado no tecido mamário, até 6 cm da superfície da mama, com a utilização do Aplicador de Marcador; os Marcadores quando utilizados em conjunto com o Leitor LOCaLizer e a Sonda Cirúrgica LOCaLizer, podem ser usados como guia para o cirurgião seguir na excisão do tecido.

Os componentes do Sistema de Localização RFID (RFLS) estão enumerados abaixo:

Sistema Componente	Referência Número
Leitor LOCaLizer	RFID Leitor HB100-EU
LOCaLizer Cirúrgica Sonda	Sonda de fixação para utilização com LOCaLizer Leitor RFID HB110-EU
Marcador Aplicador	Agulha do Aplicador com Marcador pré-carregado Marcador RFID: 5 cm de comprimento 7 cm de comprimento 10 cm de comprimento • HB200-05-EU • HB300-05-EU • HB200-07-EU • HB300-07-EU • HB200-10-EU • HB300-10-EU

A Proteção de Instrumento LOCaLizer (HB120) é fornecida separadamente para utilização com o Leitor LOCaLizer em ambiente esterilizado.

Aplicador de Marcador com Marcador pré-carregado

O Aplicador de Marcador é um dispositivo esterilizado, de utilização única (descartável), composto por:

- Agulha de aplicação com 12 gauge de calibre
- Um Marcador

O Aplicador de Marcador é composto por um cabo de plástico moldado e uma agulha biselada introdutora de 12 G de calibre com êmbolo de bloqueio. As agulhas são fornecidas em comprimentos aproximados de 5, 7, ou 10 cm e incluem marcas de referência de profundidade de 1 cm (Figura 1). O Marcador é pré-carregado no interior da agulha e é implantado no local do tecido sob orientação de ecografia ou radiografia.

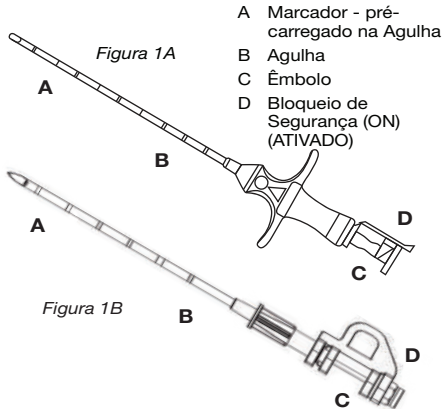


Figura 1A Aplicador de Marcador
Figura 1B Aplicador de Marcador S

O Marcador tem aproximadamente 10,6 mm de comprimento e 2 mm de diâmetro e inclui uma tampa de polipropileno concebida para evitar a migração no tecido (Figura 2). O Marcador foi concebido para fornecer um sinal detetável quando o Leitor LOCaLizer se desloca sobre o Marcador, permitindo que o Leitor LOCaLizer emita um sinal sonoro e leitura da distância que identifica a localização do Marcador implantado. O Marcador é visível por meio de ecografia, radiografia e IRM (imagem por ressonância magnética).

O Marcador tem de ser colocado no tecido a uma profundidade de ≤ 6 cm da superfície da pele para ser detetável pelo Leitor LOCaLizer.

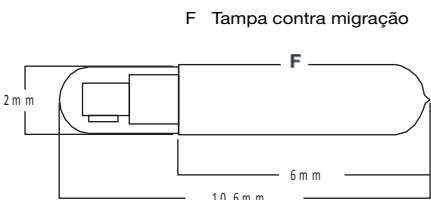


Figura 2. Marcador (A)

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Marcador do RFLS destina-se à colocação percutânea na mama para marcar (> 30 dias) uma lesão destinada a ser removida por cirurgia.

Utilizando orientação por imagem (como ecografia ou radiografia) ou assistido por orientação sem imagem (RFLS), o Marcador RFID é localizado e removido por cirurgia com o tecido alvo.

O RFLS destina-se apenas a deteção e localização sem imagem do Marcador que foi implantado numa lesão destinada a ser removida por cirurgia.

CONTRAINDICAÇÕES

O Sistema de Localização RFID não se destina a ser utilizado sob condições em que a localização da lesão mamária é contraindicada.

O Sistema de Localização RFID não se destina a ser utilizado no coração, olhos, cérebro ou medula espinhal.

O Marcador não deve ser colocado em tecido com evidência clínica de infeção.

O Marcador não deve ser colocado em tecido muscular.

AVISOS

Os Marcadores foram concebidos apenas para utilização com o Leitor e a Sonda Cirúrgica LOCaLizer.

O Aplicador de Marcador destina-se a utilização estéril. NÃO deve utilizar este produto em superfície não esterilizada antes de o utilizar internamente.

Recomenda-se precaução ao utilizar o dispositivo em doentes com próteses, de forma a não perfurar a prótese durante a colocação.

Caso sinta alguma resistência durante o avanço da agulha, corrija cuidadosamente a orientação da agulha mas nunca aplique força para ultrapassar o obstáculo.

Recomenda-se cuidado ao colocar o Marcador próximo da parede torácica. Insira o aplicador de agulha paralelo à parede torácica de forma a não perfurar a parede torácica durante a colocação.

Recomenda-se precaução durante a excisão cirúrgica da lesão para evitar cortar ou danificar o Marcador. Ao usar ferramentas eletrocirúrgicas, evite contacto direto com o Marcador, uma vez que pode resultar em danos térmicos. Em caso de danificação acidental do Marcador, assegure-se de que recupera todas as partes do Marcador do tecido circundante.

O Marcador e a agulha do Aplicador foram concebidos apenas para UTILIZAÇÃO ÚNICA (descartáveis). A reutilização deste dispositivo médico implica o risco de contaminação cruzada entre doentes. Os resíduos de material biológico podem provocar a contaminação do dispositivo com pirogénios ou micro-organismos que podem resultar em complicações infecciosas.

NÃO RE-ESTERILIZAR. Após a esterilização, a esterilidade do produto não é garantida devido a um grau indeterminado de eventual contaminação pirogénica ou microbiana que pode resultar em complicações infecciosas. Limpar, reprocessar ou reesterilizar este dispositivo médico aumenta a probabilidade de avaria do dispositivo devido a eventuais efeitos adversos sobre componentes que são influenciados por alterações térmicas e/ou mecânicas.

NÃO usar caso a embalagem esteja aberta ou danificada.

Use o Aplicador de Marcador antes de caducar a data de validade apresentada no rótulo do produto.

Para evitar confusão entre sinais produzidos por ambos os Marcadores, recomenda-se não implantar mais do que um Marcador na mesma mama alvo de cirurgia.

PRECAUÇÕES

Este produto deve apenas ser utilizado por um médico com profundo conhecimento das indicações, contraindicações, limitações, resultados normais e eventuais efeitos colaterais de colocação do Marcador no tecido.

NÃO use o Aplicador de Marcador se a agulha estiver torta e/ou a ponta danificada.

Manuseie o Aplicador de Marcador de forma a evitar a contaminação acidental.

NÃO remova o Bloqueio de Segurança do aplicador até a agulha se encontrar na localização pretendida para implantação do Marcador.

NÃO implante o Marcador a uma profundidade superior a 6 cm da superfície do seio para ficar dentro da faixa de deteção do Leitor LOCaLizer.

Certifique-se de que o Marcador se encontra completamente implantado no tecido mamário, premindo o êmbolo até que este contacte com o cilindro do Aplicador.

Após a sua utilização, o Aplicador de Marcador e o Marcador são resíduos biológicos perigosos. Elimine de acordo com os procedimentos da sua unidade para a eliminação de resíduos biológicos perigosos.

REAÇÕES ADVERSAS

Nenhuma conhecida.

APRESENTAÇÃO

O Aplicador de Marcador é fornecido esterilizado e destina-se apenas a ser utilizado uma única vez na doente (descartável). O Aplicador de Marcador não é produzido com látex de borracha natural. O Marcador é não-pirogénico.

ARMAZENAMENTO

Armazenar a temperatura ambiente entre 15° a 30°C (59° a 86°F)

SÍMBOLOS

Símbolo	Descrição
	Data de Validade
AAAA-MM-DD	A data de validade é apresentada da seguinte forma: AAAA representa o ano MM representa o mês DD representa o dia
	Advertência
	Siga as instruções de utilização www.hologic.com/package-inserts
	NÃO usar se a embalagem estiver danificada
	NÃO reesterilizar
	Apenas utilização única(descartável)
Rx ONLY	A Legislação Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo para ou por ordem de um médico
	Esterilizado com Óxido de Etileno
	Fabricante
	Número do catálogo
	Código do lote
	Quantidade

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE IRM

Condicional à RM

Testes não clínicos demonstraram que o Marcador é condicional à Ressonância Magnética. Uma doente com este dispositivo pode ser examinada com segurança num sistema de Ressonância Magnética sob as seguintes condições:

Campo magnético estático de 1,5 T e 3 T.

Gradiente de campo espacial máximo de 4 000 G/cm (40 T/m).

Sistema máximo de RM relatado, taxa de absorção específica média de corpo inteiro (SAR) de 2 W/kg em modo normal de funcionamento.

Sob as condições de varrimento definidas, espera-se que o Marcador produza um aumento máximo de temperatura de 2°C.

Em testes não clínicos, o artefacto de imagem causado pelo Marcador prolonga-se aproximadamente 25 mm a partir deste implante quando visualizado utilizando uma sequência gradiente de pulsos de eco e um sistema de RM 3 T.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NOTA: Estas instruções NÃO visam definir ou sugerir qualquer técnica médica ou cirúrgica. O médico é responsável pelo procedimento adequado e pelas técnicas a serem utilizadas com este produto.

Configuração

- 1 Inspeccione a embalagem para garantir que a integridade da embalagem não foi comprometida. O produto é estéril desde que o selo esteja intacto e a data de validade não esteja caducada.
- 2 Antes de remover o produto da embalagem esterilizada, use o Leitor LOCaLizer (Figura 3) para verificar que a Identificação do Marcador está dentro da deteção do Aplicador de Marcador e em funcionamento:

Prima o botão ligar para ligar o Leitor LOCaLizer.

Use as setas para cima e para baixo no comando de intensidade de luz para ajustar o ecrã para a intensidade pretendida.

Verifique o indicador de carga da bateria para garantir que a carga é adequada.

Use as setas para cima e para baixo no comando de intensidade de luz para ajustar o tom do som para o volume pretendido.

Passa a Sonda com aro de deteção (G) do Leitor LOCaLizer sobre a extremidade da agulha do Aplicador onde está alojado o Marcador.

AVISO: O Leitor LOCaLizer é um dispositivo não esterilizado. NÃO toque diretamente no Aplicador de Marcador com o Leitor LOCaLizer.

- 3 Observe o número de identificação exclusivo do Marcador exibido no ecrã do Leitor LOCaLizer.

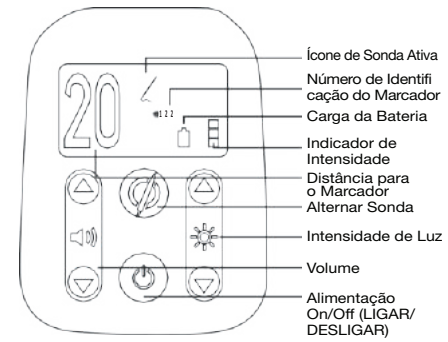


Figura 3. Leitor LOCaLizer (Parte superior dos detalhes do comando)

- 4 Utilizando uma técnica asséptica padrão, remova o Aplicador de Marcador (Figura 1) da embalagem. Remova a tampa de proteção que cobre a ponta da agulha. Verifique se a ponta da agulha está danificada.

NÃO use o dispositivo se houver sinais de danos.

Colocação

- 1 Identifique a lesão do seio alvo utilizando de preferência técnicas de imagem (ecografia ou radiografia). Localize o local pretendido para a colocação. O local de colocação não deve ter 6 cm de profundidade máxima da superfície da mama para permitir a deteção do Leitor LOCaLizer.
- 2 Determine o local de entrada na pele e prepare o local esterilizado para implantação do Marcador.
- 3 Por meio de intervenção percutânea, avance a agulha do Aplicador (B) no tecido mamário, direcionando a ponta da agulha para o local alvo. As marcas na agulha podem ser usadas como referência para a profundidade da agulha.
- 4 Confirme o posicionamento da agulha com a técnica de imagem adequada. Se necessário, reposicione a agulha e reconfirme o posicionamento.
- 5 Remova o Bloqueio de Segurança (D) do Aplicador.
- 6 Verifique a posição do Marcador utilizando a técnica preferida de geração de imagens.
- 7 Mantendo a posição do Aplicador estável, implante o Marcador avançando o êmbolo (C) até que este entre em contato com o cilindro do Aplicador.
- 8 Remova o Aplicador de Marcador e confirme a posição final do Marcador com a técnica de imagiologia preferida. Recomenda-se uma mamografia com dois planos de visão.
- 9 Confirme a posição e o funcionamento do Marcador utilizando o Leitor LOCaLizer. Para obter mais informações sobre o funcionamento do dispositivo, consulte as instruções do Leitor LOCaLizer.
- 10 Observe o posicionamento do Marcador e a Identificação para posterior excisão.

Remoção

NOTA: Para obter mais informações sobre o equipamento e funcionamento correto, consulte as instruções do Leitor LOCaLizer.

- 1 Determine a proximidade do Marcador utilizando o Leitor LOCaLizer e/ou orientação por imagem (como ecografia ou radiografia).

AVISO: Recomenda-se cuidado durante a excisão cirúrgica da lesão para evitar cortar ou danificar o Marcador.

- 2 Realize a excisão do tecido visado utilizando o Leitor LOCaLizer ou geração de imagens (ultrassom ou radiografia) para orientação.
- 3 Confirme a presença do Marcador na amostra removida utilizando o Leitor LOCaLizer ou imagiologia (ecografia ou radiografia).

Fabricado por:
Health Beacons, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752, USA
+1 (800) 442-9892

